




# Octopus Force

Research and Technology  
Development Center

## 1

### Contenido del paquete

El paquete incluye los siguientes elementos:

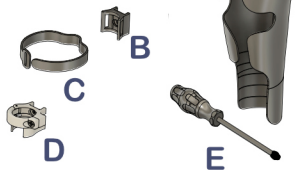


1. Cubierta protésica.
2. Sistema de anclaje superior.
3. Correa de ajuste.
4. Sistema de abrazadera inferior.
5. Destornillador para instalación.

## 2

### Instalación de los sistemas de fijación

Fije el sistema de anclaje superior y la abrazadera inferior a la cubierta utilizando los tornillos suministrados.

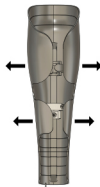

Asegúrese de que ambos componentes queden correctamente instalados antes de montar la cubierta sobre la prótesis.

## 3

### Fijación superior al socket

A. Coloque la cubierta sobre la prótesis.




B. Pase la correa alrededor del socket o de la parte superior de la prótesis y ajústela mediante la hebilla hasta obtener una sujeción firme.

C. Asegure el extremo sobrante de la correa.

## 4

### Fijación inferior al mástil

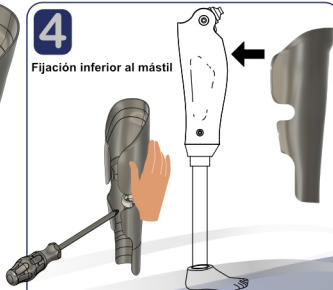

Posicione la abrazadera inferior alrededor del mástil o tubo de la prótesis. Inserte y apriete el tornillo utilizando el destornillador suministrado hasta lograr una fijación segura. Verifique que la cubierta quede estable y correctamente alineada.